



RAPTOR®

ユーザーズガイド

RAPTOR® (ラプター／図A)

サイズ:全長12.7cm (収納時)
ハサミ部:4.8cm
重さ:164g

1. 420HC折り畳みメディカルハサミ
2. シートベルトカッター
3. リングカッター
4. 定規 (5cm)
5. 酸素ボンベ用レンチ
6. 窓ガラス割り (タングステンカーバイド製)

RAPTOR各機能の使い方

●メディカルハサミ:

(図B-1)クローズ状態から(図B-2)片方ずつハンドルを矢印方向に引き出し、両面ともにカチッと音がして固定されるのを確認しハサミを使用して下さい。

(図B-3)収納する際は、本体の中心部に位置する三角形のロック解除ボタンを押して、ハンドルを矢印方向に回転させます。

●窓ガラス割り:

クローズ状態で使用します。しっかりとハンドルを握り、窓ガラスの隅を狙ってポイントの先を打ちつけます。自動車の場合は、フロントガラスよりドアガラスの方が割れやすくなります。

●酸素ボンベ用レンチ:

ハンドルを閉じた状態で使用します。カッター部分のパーツを固定されるまで引き出し、レンチをバルブにセットして開閉してください。

●リングカッター:

ハサミの開閉と同様の動作で使用します。一般的な材質、硬度の指輪を切断できますが、材質や太さによっては切断できない場合があります。

●シートベルトカッター:

クローズ状態からカッターパーツを引き出し、固定されるのを確認してください。鉤状の刃をシートベルトに引っ掛けてそのまま引き切ります。

RAPTOR使用動画のご案内







スマートフォンやタブレット端末でQRコードを読み込んでいただくと、レザーマン公式YouTubeにアクセスします。参考になさってください。

安全な使い方・特徴

LEATHERMANは、複数の機能を装備するマルチツールとしてとても便利なものですが、ナイフ以外のツールでも仕様上で尖っている部分や端面が鋭利な部分があります。本ユーザーズガイドをお読みの上、ご使用の際や携帯時は、怪我をしないよう十分に注意して下さい。

USER'S GUIDE

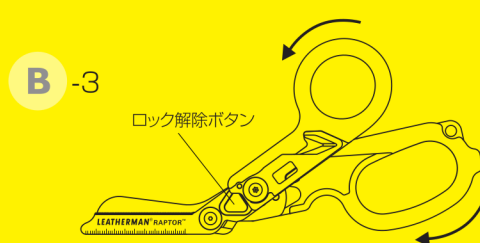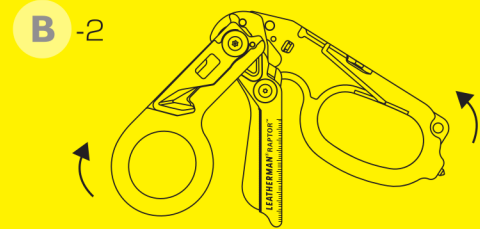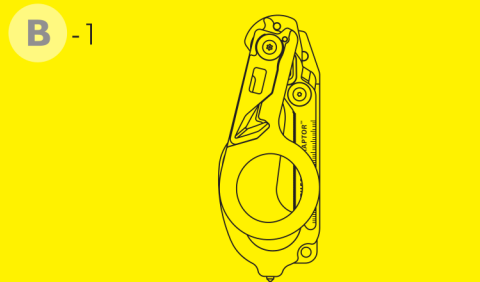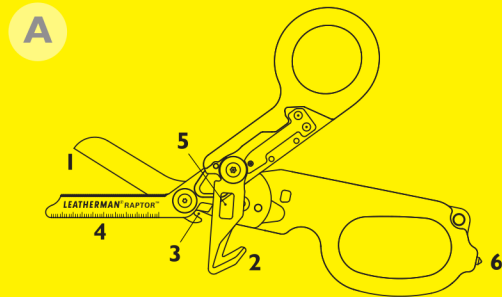

ユーザーズガイド

プラスチックケース(ホルスター)の使い方

プラスチックケースは、RAPTORがクローズ状態でも、ハサミの状態でも使用することができます。収納状態で使用する場合は、ポケットクリップを表側にし、ハンドルを下にして挿し込んでください。(図C)ハサミの状態で使用する場合は、ポケットクリップを表側にし、刃先から挿入します。底部のスリットにハサミの刃先が固定されたことを確認して携帯してください。

ベルトに通す際は、ケース背面にあるネジを緩め、ベルト通しを回転させます。ベルトに通したら背面のネジをしっかりと締め直し、確実に固定して携帯してください。(図D-1～D-3)

メンテナンス

各ツールは、ハイクレード・ステンレス鋼を採用しています。錆びにくいですが、不十分なメンテナンスでは錆びることがあります。

ご使用後は汚れを落とし乾いた状態にして下さい。水気が付着したり湿気の多い所での使用後は水気を拭き取り、さらに潤滑剤を挿して下さい。

品質保証

お客様が、レザーマンツールをご購入後25年以内に、材質や製造上の不良を見つけれられた時や、修理が必要となった時は、レザーマンツールジャパン(株)に送付して下さい。

往復の送料はお客様のご負担となる点をご了承下さい。また、必要であればお客様ご自身で保険を掛けて下さい。弊社は、返送途中で紛失した場合の責任は負いません。

この保証は、誤用、乱用、改造された製品や不当に使われた製品には適用されません。また、シース、アクセサリやカラー仕上げハンドルの色の剥離、変色には適用されません。レザーマンツールグループ社及びレザーマンツールジャパン(株)は、製品の使用上で偶発的に発生する損傷については保証いたしません。

保証に関する詳細は、弊社WEB「保証と修理」をご確認下さい。

レザーマンツールジャパン株式会社

〒501-3217 岐阜県関市下町5178
Tel. 0575-23-5103 / Fax. 0575-22-2347
www.leatherman-japan.com

*製品をご使用にならない時は、必ず子供の手の届かない場所に保管して下さい。
*製品をご使用の際に発生した怪我等に関し、弊社では責任は負いかねます。
*ナイフ類を正当な理由なく携帯する事は、法律により禁じられています。
*本ユーザーズガイドの無断転載、複製を禁ず。
*製品のデザイン、形状、材質等は予告なく変更になる場合があります。
©2019 Leatherman Tool Japan LTD.

USER'S GUIDE

